

エレベーター Elevators

エレベーター D 型 NM



【臨床動画】

- ・薄く扇状に広がった先端形状が狭い歯根空隙にもスムーズに挿入できます。
- ・張りでた両端のエッジが歯根に有効に作用します。



先端5.0mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	4.0mm
				
# NM1	# NM2	# NM2S	# NM2A	# NM3
コード No.16055 標準価格 9,800円 (カーブ)	コード No.16056 標準価格 9,800円 (カーブ) (日大型)	コード No.16059 標準価格 9,800円 (ストレート)	コード No.16058 標準価格 9,800円 (リバース)	コード No.16057 標準価格 9,800円 (カーブ)

#NM2S(ストレート)



写真提供: 津田 宏尚 先生 (インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)

#NM2(カーブ)



写真提供: 奈良 嘉峰 先生 (茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長)

エレベーター D 型 NM

・先端幅が2.5mmと狭いため、狭窄している歯根空隙にも挿入できます。



【臨床動画】




残根用# NM1S
コード No.16555
標準価格 9,800円
(ストレート)

残根用# NM1R
コード No.16556
標準価格 9,800円
(リバース)

※ハンドルに「RT」と刻印が入っています。
残根: Root Tip




・作業長がNMより10mm長く、無理なく智歯に到達します。
・滑り止めの指置きにより、安定した操作をサポートします。

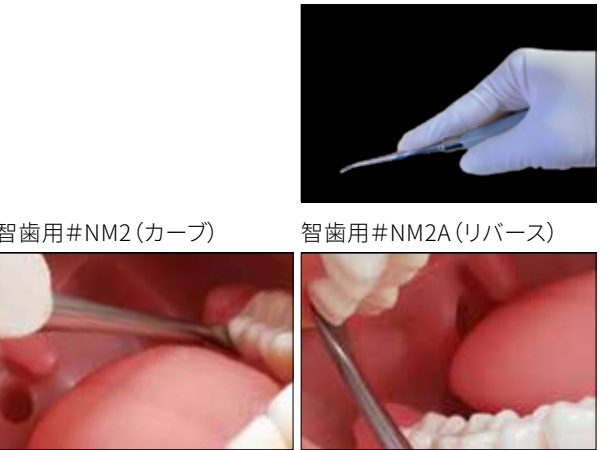


エレベーター D 型 / B 型

エレベーター D 型
標準価格 9,800円
・しっかりと握れる径の太いハンドルです。

エレベーター B 型
標準価格 9,800円
・操作性の良いスタンダードなハンドルです。

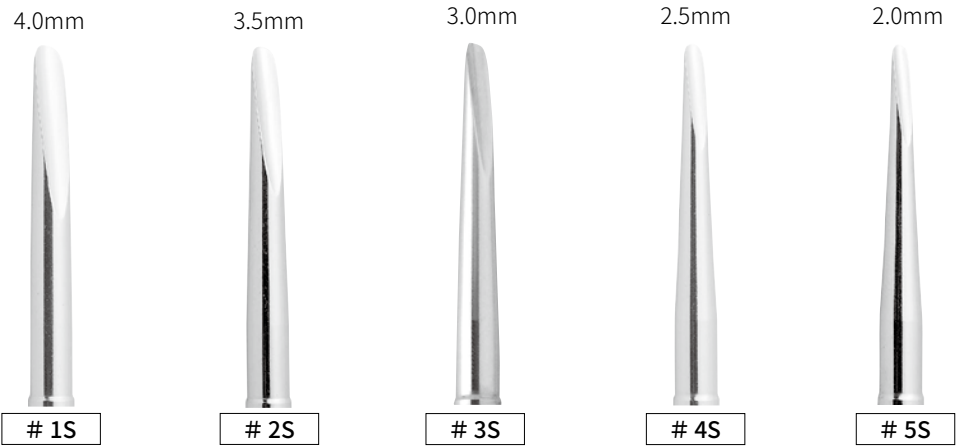

品名		# 1	# 2	# 3	# 4	# 5
ハンドル	先端径	4.0mm	3.5mm	3.0mm	2.5mm	2.0mm
エレベーターD型	ストレート (S)	16121	16122	16123	16124	16125
エレベーターB型	ストレート (S)	16101	16102	16103	16104	16105

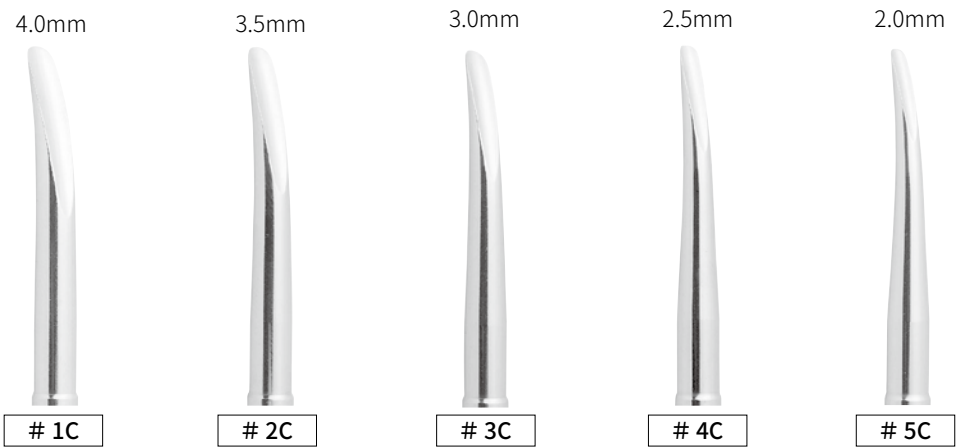

品名		# 1	# 2	# 3	# 4	# 5
ハンドル	先端幅	4.0mm	3.5mm	3.0mm	2.5mm	2.0mm
エレベーターD型	カーブ (C)	16126	16127	16128	16129	16130
エレベーターB型	カーブ (C)	16106	16107	16108	16109	16110

エレベーター B 型

・少ない開口量でも臼歯部に届くアングルなので、開口不全の患者さんに有効です。



20AL

コード No.16015
標準価格 9,800円



21AL

コード No.16016
標準価格 9,800円

・頬(唇)側に歯質がなく先端部がかかりにくい場合に
舌(口蓋)側から少ない開口量でアクセスできます。



写真提供：今北 将人 先生（スマイル歯科・北海道医療大学 非常勤講師）

・作業長が通常のエレベーターに比べ20mm長くなっています。
・指をかけるくぼみがあるため、安定します。

3.0mm



智歯用 # 1

コード No.16065
標準価格 11,000円
(カーブ/15°)

3.0mm



智歯用 # 2

コード No.16066
標準価格 11,000円
(カーブ/20°)

3.0mm



智歯用 # 3



コード No.16067
標準価格 11,000円
(リバース/30°)

※ハンドルに「WT」と刻印が入っています。
智歯：Wisdom Tooth

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000645D005 一般的名称 歯科用エレベータ 販売名 エレベーター B型

ルートチップピックス

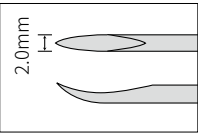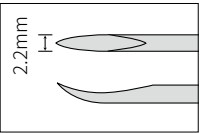

1S

コード No.16085
標準価格 9,800円



2A

コード No.16086
標準価格 9,800円



3A

コード No.16087
標準価格 9,800円




両頭

コード No.14601
標準価格 9,800円

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。


医療機器届出番号 11B1X1000645D002 一般的名称 歯科用エレベータ 販売名 ルートチップピックス

ルートチップエレベーター

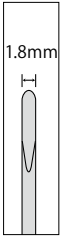

1S-0

コード No.16810
標準価格 **9,800**円
(ストレート)

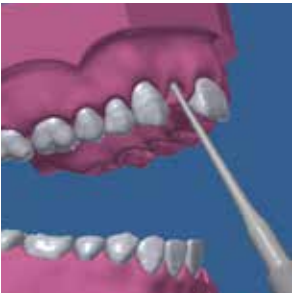


・前歯部から小臼歯部あたりまでは先端部を歯軸と一致させやすいため、先端方向がわかりやすいストレートをセレクト。
臼歯部では初めの歯根膜空隙の拡大に有効です。



1S-15

コード No.16811
標準価格 **9,800**円
(カーブ/15°)

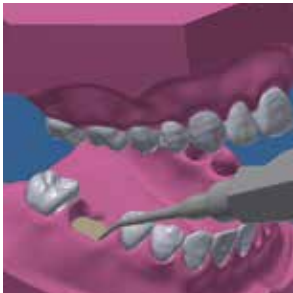


・臼歯部はストレートでは先端部を歯軸と一致させにくいため、術歯の部位、傾斜、患者さんの開口量に合わせて2種類のカーブからセレクト。




1S-30

コード No.16812
標準価格 **9,800**円
(カーブ/30°)

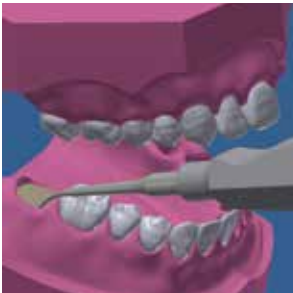

1S-15R

コード No.16813
標準価格 **9,800**円
(リバース/15°)

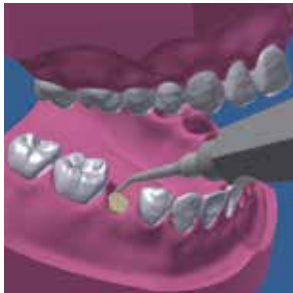

・臼歯遠心側・舌、口蓋側からのアクセスにはリバースをセレクト。



1S-30R

コード No.16814
標準価格 **9,800**円
(リバース/30°)



2A

コード No.16076
標準価格 **9,800**円
(カーブ/30°)



・開口量が少ない患者さん、根尖付近の残根には頸部が屈曲したアングルをセレクト。



3A

コード No.16077
標準価格 **9,800**円
(カーブ/30°)



下顎左側6番 遠心根



下顎左側6番 近心根



下顎右側7番



下顎左側6番 遠心根

エレベーター B 型

スピアー



【臨床動画】

- ・ 槍状の薄い先端部のため、歯根膜空隙へ挿入がしやすく歯根膜線維を鋭利に切断します。
- ・ インプラントの即時埋入症例の抜歯時、歯周組織をできる限り傷つけずに残すことができます。




・ 槍状の先端が、残根等の見つけにくい歯根膜空隙の探知を可能にします。




・ 薄い先端部で、狭窄している歯根膜空隙にも挿入できます。

[使用方法]

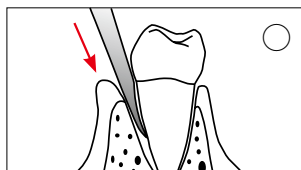

・ 先端部を歯根膜空隙に根尖側方へ挿入することにより、歯周靭帯を切断し、楔作用で歯牙を挺出させます。

[注意点]

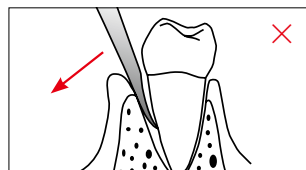

・ てこの作用で歯根を持ち上げるような操作は行わないでください。先端部が破折、変形する恐れがあります。

先端3.7mm



1S

コード No.16141
標準価格 **9,800円**
(ストレート)



1C

コード No.16144
標準価格 **9,800円**
(カーブ)



1R

コード No.16147
標準価格 **9,800円**
(リバース)



2

コード No.16145
標準価格 **9,800円**



3

コード No.16146
標準価格 **9,800円**



写真提供：奈良 嘉峰 先生（茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長）



[#1C (カーブ)]



・ 先端部が反っているため、歯軸に合わせて挿入しやすい臼歯部での使用に有効です。

[#1R (リバース)]



・ 先端部が内側に反っているため、臼歯部の遠心面や舌・口蓋側からのアプローチに有効です。

[#2・#3]



・ 臼歯部などストレートシャंकでは届きにくい部位に有効です。
・ 作業部の中心がハンドルの延長線になるように設計されているため、操作バランスがよく、感覚伝達性に優れています。

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000645D005 一般的名称 歯科用エレベーター 販売名 エレベーター B型

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区北野2丁目15番15号 TEL03-3834-0161 B型
http://www.dental-plaza.com/