

技工 Laboratory Techniques




製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。

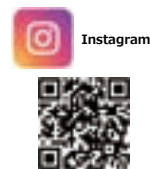



ホー #110
コード No.18410
標準価格 8,800円




ピーソ #118
コード No.18418
標準価格 8,800円



ギヤスリー #136
コード No.18436
標準価格 8,800円



ゴードン #137
コード No.18437
標準価格 8,800円

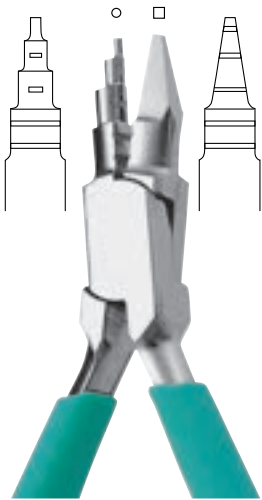


ヤング # R74
コード No.18474
標準価格 14,000円



溝型
コード No.18480
標準価格 14,000円

※使用ワイヤー曲げ許容径 φ 1.0mm

医療機器届出番号 1181X1000639D004
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 技エプライヤー

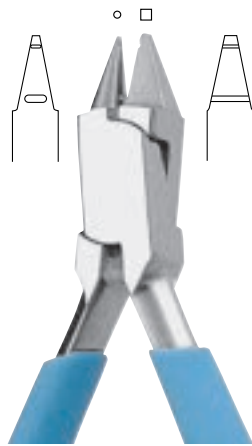

クラスプ ベンディング #1
コード No.18481
標準価格 14,000円



KI型
コード No.18482
標準価格 14,000円



さんし 三嘴
コード No.18483
標準価格 14,000円


医療機器届出番号 1181X1000639D004
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 技エプライヤー

※使用ワイヤー曲げ許容径 φ 1.0mm

バーベンダー #2



●リンガルバー、パラタルバーのベンディング用。

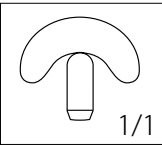

コード No.18702
標準価格 19,800円

医療機器届出番号 1181X1000639D003
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 バーベンダー

バー捻転鉗子 KI型



●リンガルバー、パラタルバーのベンディング用。



#1 コード No.18751
標準価格 11,000円



#2 コード No.18752
標準価格 11,000円

医療機器届出番号 1181X1000639D001
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 バー捻転鉗子

ワイヤーカッター



1/1



YS-602 KI型 コード No.22602
標準価格 12,430円
切断許容径 φ1.1mm



YS-603 スタンダード コード No.22603
標準価格 9,350円
切断許容径 φ1.2mm

医療機器届出番号 11B1X1000639D103
一般的名称 歯科矯正用プライヤ 販売名 ワイヤーカッターYS

技エツィザー



1/1



直 コード No.20905
標準価格 11,000円



曲 コード No.20906
標準価格 11,000円

医療機器届出番号 11B1X1000639D005
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 技エツィザー

技エツィザー スタンド付



1/1

●陶材・レジン等の築成に適しています。



コード No.20908
標準価格 13,000円

医療機器届出番号 11B1X1000639D005
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 技エツィザー

スペイシー咬合器 アルコン型



- アルコン型の平均値咬合器です。
- 重ねて収納できるため、場所をとりません。
- 開閉レバーにより、上顎弓の取外しがカンタンです。
- 下顎フレームの後方スペースが広いので、作業がしやすくなっています。
- 上顎弓を開口した際、咬合器が後方へ転倒しづらい設計です。
- 咬合器を逆さにしても、上顎弓の3か所の突起により安定して置けます。
- 名前・番号などが記入できるプレートがついています。

仕 様

上下顎フレーム間距離	100mm
ボンウィル三角の一边	110mm
矢状顎路傾斜角	25°
側方顎路角(ベネット角)	15°
バルクウィル角	20°
切歯路角	前方…10°
	側方…10°
咬合平面	カンペル平面

付属品

- ・マウンティングリング 2個
- ・模型固定板 10枚




レッド コード No.19726
標準価格 24,000円



●積み重ねて保管することが出来ます。



●下顎フレームの広いスペースは作業性に優れています。

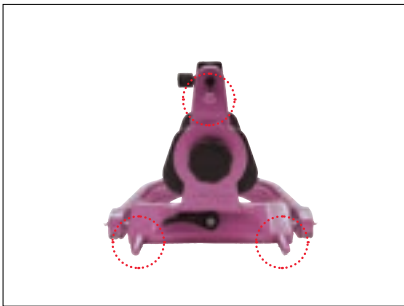

●逆さまに設置した場合、3つの突起でバランスを保ちます。

1/2

スペイシー咬合器(半調節) ウィング



- アルコン型の半調節咬合器です。
- 開閉レバーにより、上顎弓の取外しがカンタンです。
- 下顎フレームの後方スペースが広いので、作業がしやすくなっています。
- 上顎弓を開口した際、咬合器が後方へ転倒しづらい設計です。
- 咬合器を逆さにしても、上顎弓の3か所の突起により安定して置けます。
- 名前・番号などが記入できるプレートがついています。

仕 様

上下顎フレーム間距離	100mm
ボンウィル三角の一边	110mm
矢状顎路傾斜角	0～60°(5° 刻み)
側方顎路角(ベネット角)	0～30°(5° 刻み)
バルクウィル角	20°
切歯路角	前方…10°・15°・20°
	側方…10°・15°・20°
咬合平面	カンペル平面

付属品

- ・マウンティングリング 2個
- ・模型固定板 10枚
- ・切歯指導板 15°・20° (10° は咬合器に装着しています。)



コード No.19730
標準価格 98,000円

医療機器届出番号 1181X1000668D005
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 スペイシー咬合器

スペイシー咬合器(半調節) モービル



- コンダイラー型の半調節咬合器です。
- 下顎フレームの後方スペースが広いので、作業がしやすくなっています。
- 咬合器を逆さにしても、上顎弓の3か所の突起により安定して置けます。

仕 様

上下顎フレーム間距離	94mm
ボンウィル三角の一边	110mm
矢状顎路傾斜角	15～50°
側方顎路角(ベネット角)	0～20°
バルクウィル角	20°
切歯路角	前方…10°・15°・20°
	側方…10°・15°・20°
咬合平面	カンペル平面

付属品

- ・切歯指導板 15°・20° (10° は咬合器に装着しています。)



コード No.19660
標準価格 34,000円

医療機器届出番号 1181X1000668D005
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 スペイシー咬合器

スペイシー咬合器 スマート2



- コンダイラー型の平均値咬合器です。
- フルバランスド・オクルージョンの総義歯が製作できます。

1/2

仕 様	
上下顎フレーム間距離	94mm
ボンウィル三角の一辺	110mm
矢状顎路傾斜角	30°
側方顎路角(ベネット角)	7.5°
前方運動調節	0～7mm (1mm刻み)
ハルクウィル角	20°
切歯路角	前方…10° 側方…10°
咬合平面	カンペル平面



コード No.19662
標準価格 48,000円


総義歯製作のステップ

- ①概形印象
- ②咬合採得
- ③人工歯排列
- ④中心位のチェックバイト
- ⑤人工歯再排列
- ⑥埋没と重合
- ⑦リマウントによる咬合調整
- ⑧完成


⑦リマウントによる咬合調整方法



セントリックバイトを採得する。

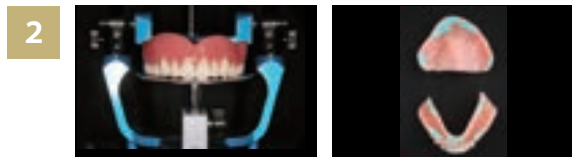

咬合平面板を用いて、上顎義歯からマウントする。その際に、義歯の粘膜にあたるアンダーカット部は埋めて分離剤を塗り、石膏を流す。

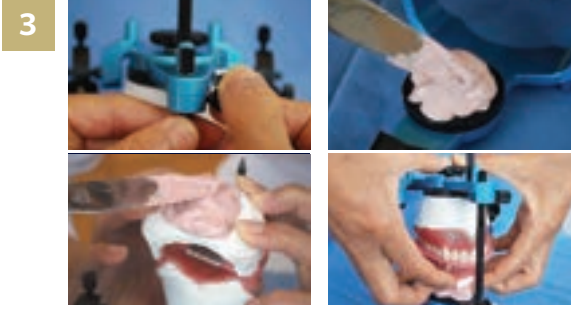

切歯指導ピンをバイト材の厚み分（2～3mm）上げ、セントリックバイトで下顎の義歯をマウントし、石膏を流す。



人工歯の削合は、中心位（前方運動調節ネジを0mmに設定）、側方運動（作業側・平衡側）を行い、前方運動は切端咬合から中心位まで前方運動調節ネジを1mm間隔で固定してそれぞれの位置で臼歯部が咬合するまで下顎前歯部の削合を行い、バランスド・オクルージョンを与えて完成です。

フェイスボー タイプ2



- スペイシー咬合器シリーズ全種に対応

1/2



コード No.19682
標準価格 52,800円



別 売
キャストサポート
コード No.19677
標準価格 4,200円

フェイスボー タイプ2 医療機器届出番号 11B1X1000668D201
一般的名称 歯科用顔弓 販売名 フェイスボー
スペイシー咬合器キャストサポート 医療機器届出番号 11B1X1000668D005
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 スペイシー咬合器

スペイシー咬合器シリーズ オプション




1.可動式咬合平面板



2.アルコン型咬合平面板



3.スプリットキャスト
プレート B

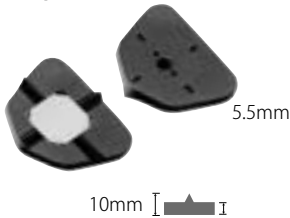

4.スプリットキャスト
模型固定板



5.マウンティングリング



※厚さ／5mm

6.切歯指導板 10°



7.切歯指導板 15°



8.切歯指導板 20°



	コードNo.	品名	アルコン型	ウィング	モービル	スマート2	標準価格	入数
1	19680	可動式咬合平面板	○	○	○	○	5,800円	1入
2	19729	アルコン型 咬合平面板	○	○			2,800円	1入
3	19655	スプリットキャストプレート B	○	○	○	○	3,410円	2入
4	19645	スプリットキャスト 模型固定板	○	○	○	○	1,210円	10入
5	19646	マウンティングリング	○	○	○	○	610円	2入
6	90136	切歯指導板 10°	○	○	○	○	490円	1入
7	90152	切歯指導板 15°	○	○	○	○	490円	1入
8	90153	切歯指導板 20°	○	○	○	○	490円	1入

医療機器届出番号 1181X1000668D005
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 スペイシー咬合器

ユニティ咬合器



1/2

仕 様	
上下顎フレーム間距離	53mm
ボンウィル三角の一辺	70mm
矢状顎路傾斜角	20°



コード No.19601
標準価格 11,000円

医療機器届出番号 1181X1000668D004
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 ユニティ咬合器

局部咬合器




1/2



A型 コード No.19501
標準価格 9,400円



B型 コード No.19502
標準価格 12,000円

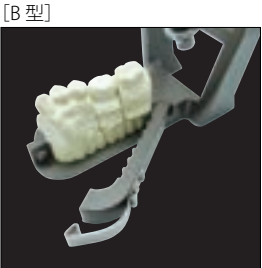

●咬合器から模型を取り外して
作業できます。

医療機器届出番号 1181X1000668D001
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 局部咬合器

彫刻刀 エバン



1/1



コード No.07160
標準価格 4,400円



#AT1 コード No.07165
標準価格 4,400円



#AT2 コード No.07166
標準価格 4,400円



スリム コード No.07164
標準価格 4,400円

医療機器届出番号 11B1X1000670D001
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 彫刻刀

彫刻刀 レグロン



1/1



コード No.07161
標準価格 4,400円

医療機器届出番号 11B1X1000670D001
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 彫刻刀

PKTインスツルメント JM型



1/1

▶ドロップオンインスツルメント



#1 コード No.07201
標準価格 4,750円



#5 コード No.07205
標準価格 4,750円

医療機器届出番号 11B1X1000670D003
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 P K Tインスツルメント

PKTインスツルメント YS型




1/1

▶ドロップオンインスツルメント



#1 コード No.07211
標準価格 3,630円

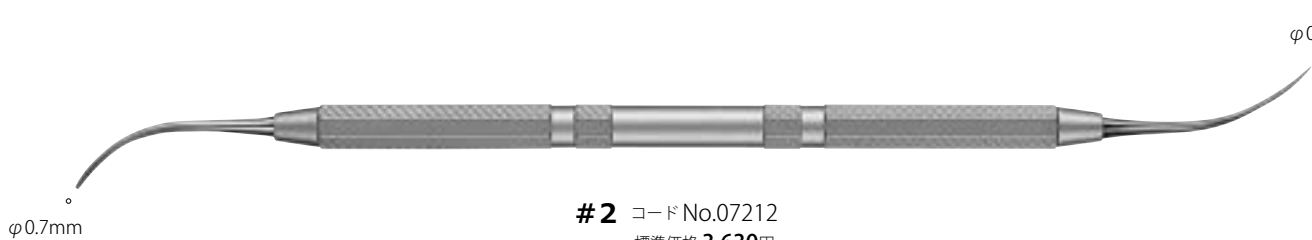

#2 コード No.07212
標準価格 3,630円

医療機器届出番号 11B1X1000670D003
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 P K Tインスツルメント

ワックス形成器



1/1



ホーレンバック #1/2 コード No.07114
標準価格 3,630円



キャポン コード No.07163
標準価格 4,800円

医療機器届出番号 1181X1000665Dc01
一般的名称 歯科用ワックス形成器 販売名 ワックス形成器

インレー形成器



1/1



#1 コード No.07011
標準価格 3,520円



兵藤型 #2 コード No.07042
標準価格 3,630円

医療機器届出番号 1181X1000670D008
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 インレー形成器


ワックス スパチュラ




1/1




#1 コード No.11601
標準価格 3,800円

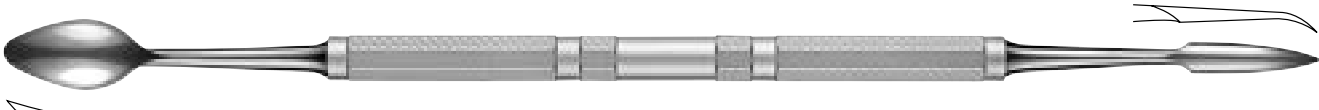

#2 コード No.11602
標準価格 3,800円

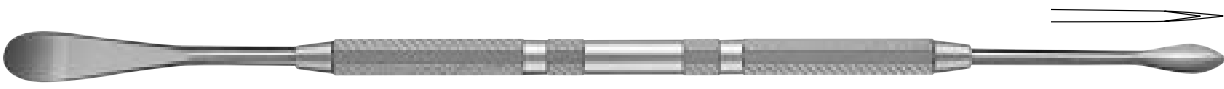

#7A コード No.11607
標準価格 3,800円

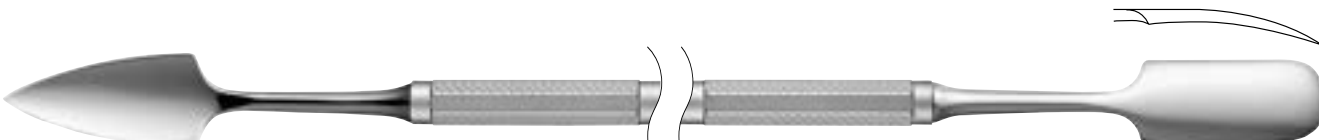

#31 コード No.11631
標準価格 3,800円

サイズ/195mm

医療機器届出番号 1181X1000670D002
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 ワックススパチュラ





オーダーシステム WC（ワックス形成器）



●先端部と7色のハンドルを自由に合わせてオーダーできます。

1/1

先端部

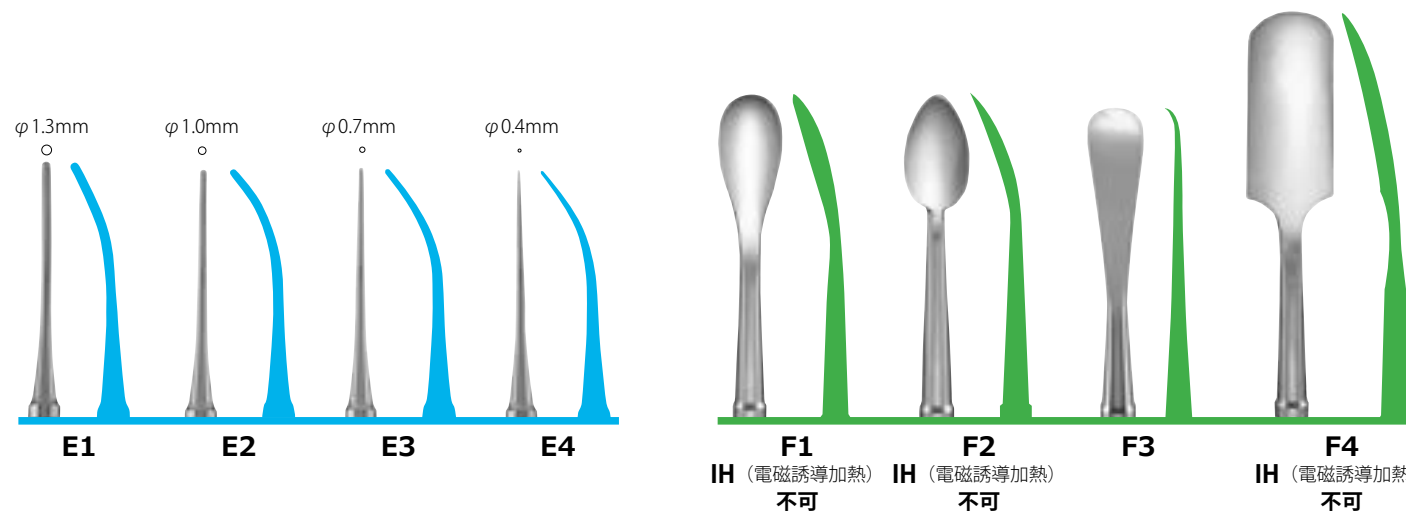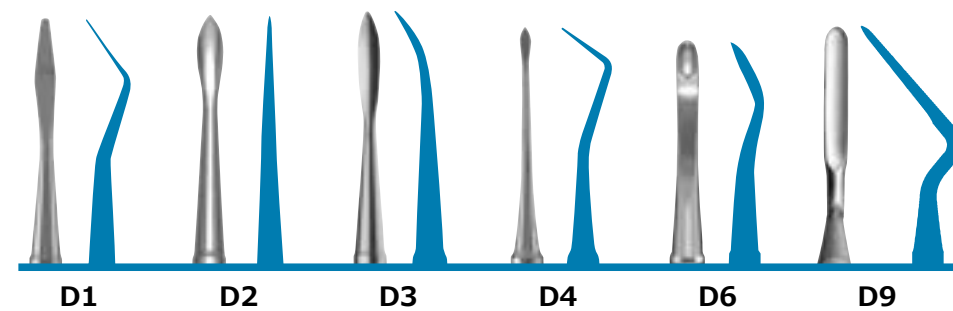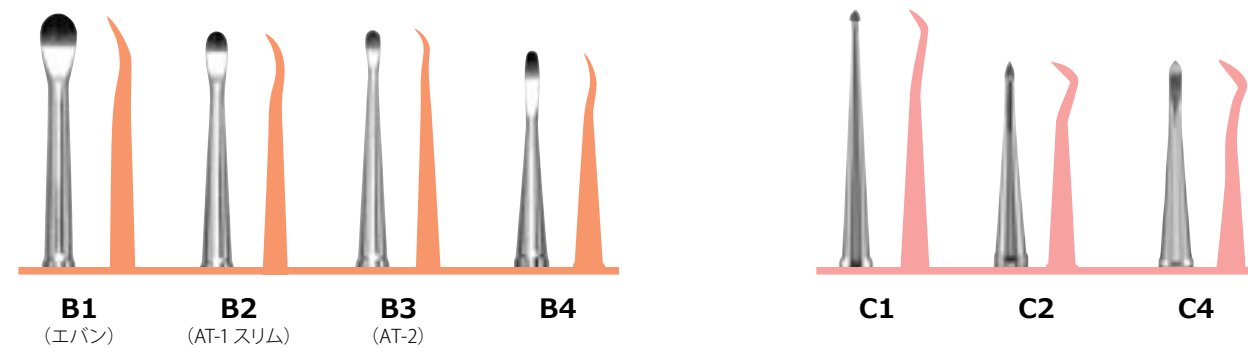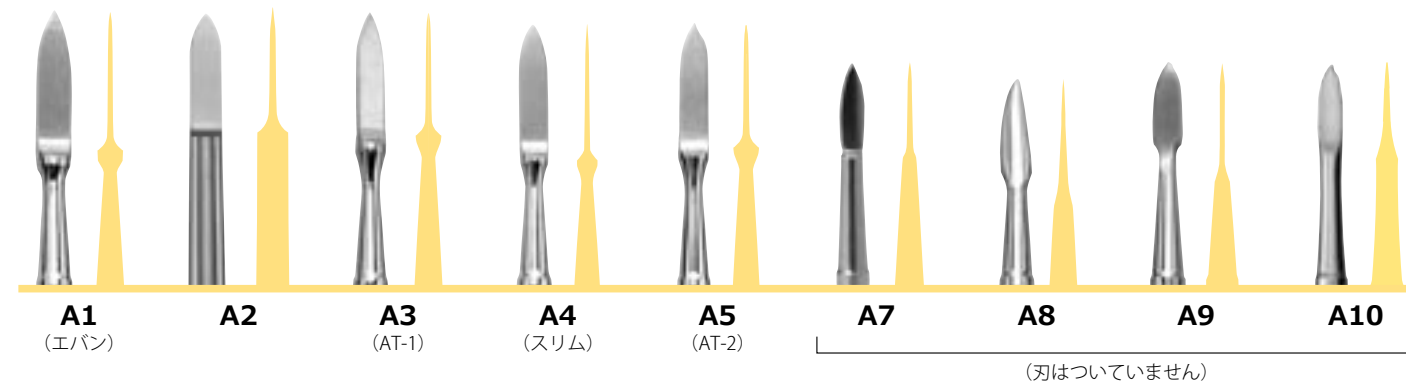

オーダーシステム RC（レジン形成器）



▶ダイヤモンドライク カーボンコーティング

1/1



DLC (Diamond Like Carbon)コーティングの利点

●DLCは高硬度 (Hv3000 ~ 4500) の為、レジン含有の無機フィラー (Hv1000 ~ 1500) よりも低硬度のステンレス鋼にコーティングすることで、摩耗・キズを防ぎ、金属粉によるレジンの黒ずみ、キズついた粗造面によるベタつきを解消します。

●非晶質構造のDLC膜は、窒化チタンなどの多結晶構造の硬質薄膜と比べて非常に平滑な表面をしているため、レジン剥離性に優れ、操作性、機能性が向上します。


●先端部と7色のハンドルを自由に合わせてオーダーできます。
●表面硬度が高く、耐摩耗性に優れ、レジン離れも良くなっています。

先端部

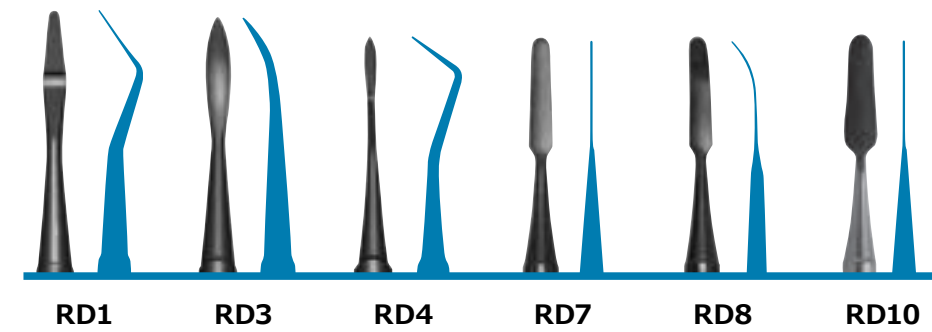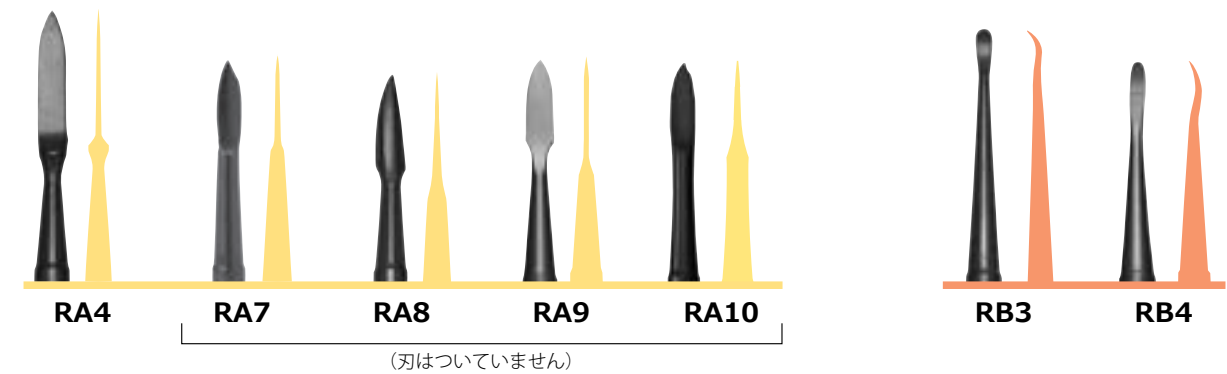





ハンドル


サイズ/105mm

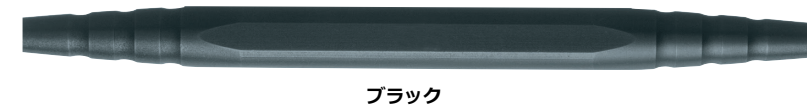

ハンドル

サイズ/95mm

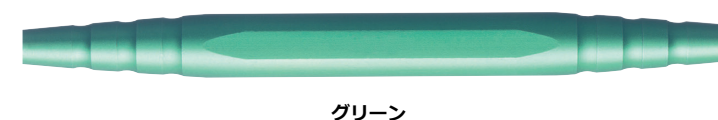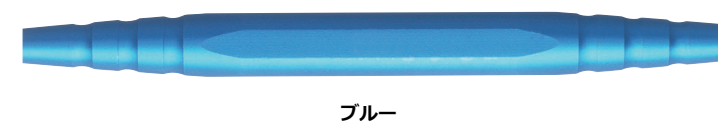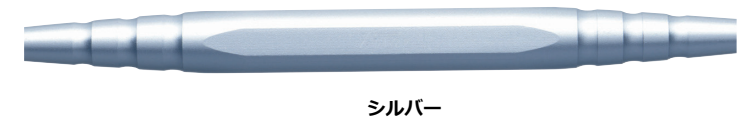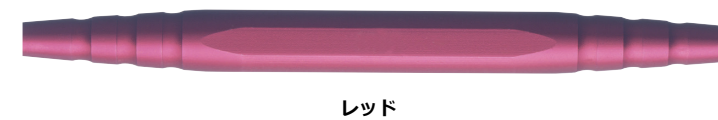


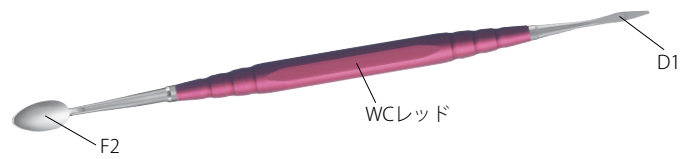

【組合わせ例1】 ワックス形成器 (WC)

柄部：レッド
先端部：D1・F2 をご指定の場合

コード No.07300 「オーダーシステム WC レッド + D1 + F2」

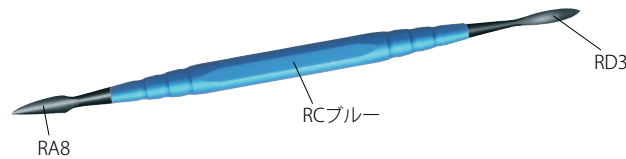

【組合わせ例2】 レジン形成器 (RC)

柄部：ブルー
先端部：RA8・RD3 をご指定の場合

コード No.07311 「オーダーシステム RC ブルー + RA8 + RD3」

色	ワックス形成器WC		レジン形成器RC	
	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格
レッド	07300	4,400円	07310	5,500円
ブルー	07301		07311	
グリーン	07302		07312	
シルバー	07303		07313	
ブラック	07304		07314	
ゴールド	07305		07315	
バイオレット	07306		07316	

医療機器届出番号 1181X1000670D010
一般的名称 歯科技工用形成器具 販売名 オーダーシステム

ホットプレート



1/2

- 蠟堤形成用へう。
- 技工作業台に付着したワックス等の除去にも使用できます。



コード No.11650
標準価格 6,820円

コンデンスハンマー



3/4



コード No.21511
標準価格 2,220円

医療機器届出番号 1181X1000643D002
一般的名称 つち 販売名 コンデンスハンマー


フジ・バイトロック



1/1



コード No.21421
標準価格 5,800円 (12入)

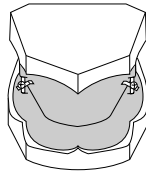

- 熱して上下顎間ワックスを固定します。

ダイヤモンド ドレッサー



2/3

- 両面にダイヤモンドがコーティングされています。
- ダイヤモンド粒子により、効率よくポイント類の形態修正ができます。



コード No.13055
標準価格 7,800円

サイズ／W110×D17×H3mm

石膏鉗子



2/3



L コード No.18811
標準価格 14,000円



S コード No.18812
標準価格 14,000円

医療機器届出番号 11B1X1000639D002
一般的名称 歯科技工用鉗子 販売名 石膏鉗子

石膏刀



1/1



コード No.21340
標準価格 2,800円

石膏ノコ タイプ4セット



2/3

- 替刃はハンドルを回転し、装着部を緩ませて簡単に着脱できます。
- 本体に適度な重みがあり安定する為、軽い力で操作でき、ブレが軽減します。



コード No.13208
標準価格 5,800円 (替刃4本付)

サイズ／210mm



サイズ／100mm 厚さ0.2mm

単品

替刃 コード No.13214
標準価格 1,500円 (4本入)

ロッキングツィザー



1/1



YS-707 S コード No.22707
標準価格 4,800円



YS-708 L コード No.22708
標準価格 4,800円

医療機器届出番号 11B1X1000636D016
一般的名称 ピンセット 販売名 ロッキングツィザー




直 コード No.11401
標準価格 3,800円



曲 コード No.11402
標準価格 3,800円



スリム

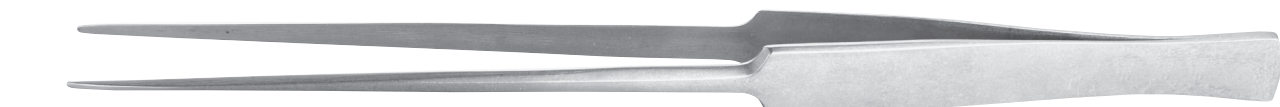

直 コード No.11404
標準価格 3,800円



曲 コード No.11405
標準価格 3,800円

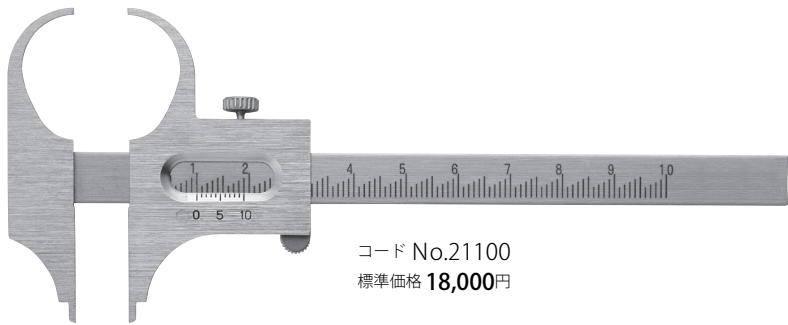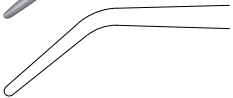


コード No.21100
標準価格 18,000円

デンタル キャリパス




●物体の内外径、蟬堤の高さと幅、咬合の高さ等、補綴操作上で多用途に計測ができます。

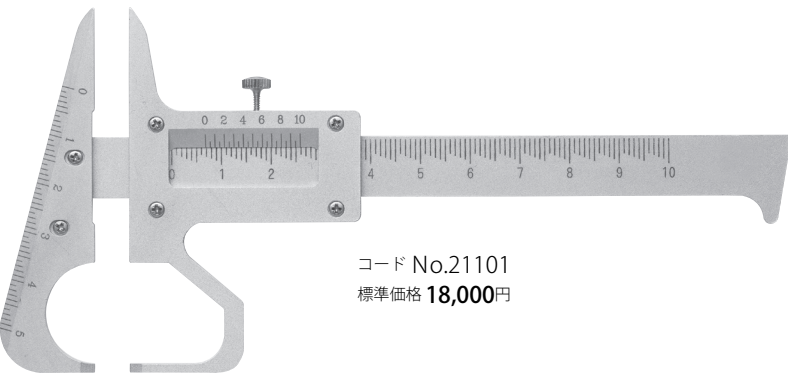

コード No.21101
標準価格 18,000円

【裏面の目盛り】

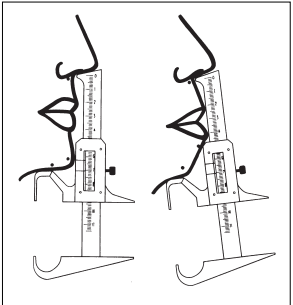


●咬合高径計測器として、総義歯の鼻下点・オトガイ間距離の位置決めができます。


バイトゲージ 坪根型



●咬合高径計測器

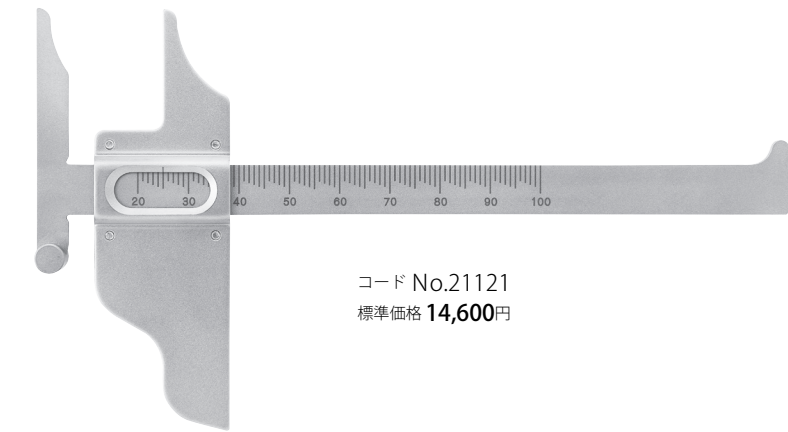

コード No.21121
標準価格 14,600円

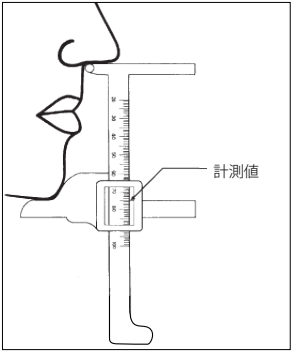

平行測定器


●支台歯、ポスト、ピン、アタッチメント等の平行性の確認、ポンティックの幅径の計測等が可能です。



2/3



コード No.21122
標準価格 12,980円

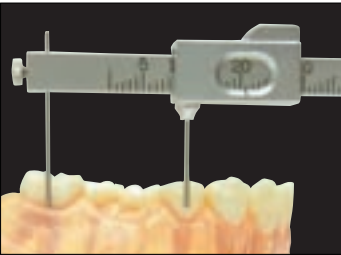

医療機器届出番号 11B1X1000658D402
一般的名称 整形外科用カリバ 販売名 平行測定器

メジャーリング デバイス3



●表裏両方に目盛がついています。

1/1



コードNo.21114
標準価格 8,800円
メタル・ワックス兼用



前装冠用 コードNo.21115
標準価格 8,800円

ハンディトーチ



2/3

- ワックスが目づまりしにくいデザインです。
- 手持ち・卓上のいずれでも使用できます。
- 火力の微調整が可能で、炎は安定しています。



サイズ／W76.6×D54.5×H154mm

Labo コード No.22771
標準価格 19,800円

- 大きな炎なので、技工等の
パワフルな作業に適しています。



Ortho コード No.22772
標準価格 19,800円

- 細い炎なので、矯正治療等の
細かい作業に適しています。

製品構造



仕様

重さ／245g(スクリーン板付)
ガス量／15g
燃焼時間／Labo 約35分
Ortho 約80分
火炎温度／1,300℃(青火)



- ハンディトーチを寝かせて使用する場合、炎が真上に向かないため、作業時にワックスが火口に落ちにくい設計になっています。

別売

ガスボンベ ※専用のガスボンベを
コードNo.22767 ご使用ください。
標準価格 830円(130g) 故障の原因となる
恐れがあります。

医療機器届出番号 11B1X1000669D001
一般的名称 歯科用バーナ 販売名 ハンディトーチ



▶湿熱式



上顎用 コード No.21411
標準価格 **18,000**円



下顎用 コード No.21412
標準価格 **18,000**円

サイズ／W100×D95×H57mm

※中ぶた付

医療機器届出番号 1181X1000669D101
一般的名称 歯科用フラスコ 販売名 フラスコ