
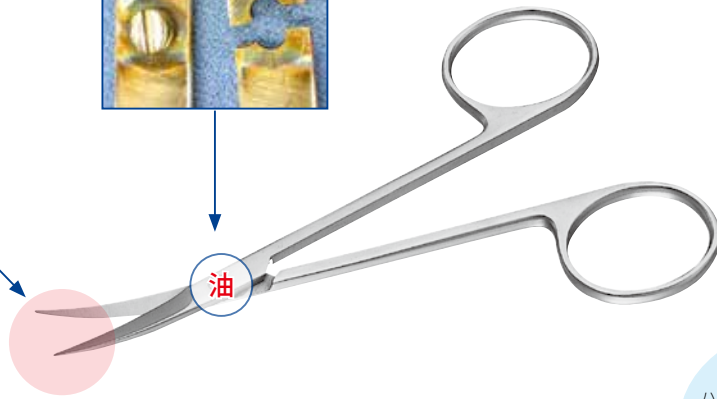


ハサミ

禁忌薬剤の使用・乾燥不足・注油不足による
【ジョイント部のサビ・折れ】

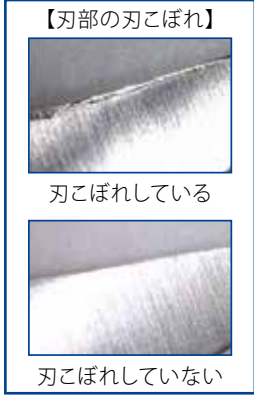

ハサミや鉗子の【ジョイント部】等の金属が擦れ合う部分には、オートクレーブ前に医療器具専用防錆潤滑油「13093 インストルメントオイル」を塗布することをおすすめします。

持針器

過剰応力・残留応力による
【持針部のヒビ】

長期使用による
【持針部の摩耗】



禁忌薬剤の使用・乾燥不足による
【ネジ接触部のサビ】 【バネ部品のヒビ】



注油不足による
【ラチェット部のガジリ】



禁忌薬剤の使用による
【持針部のサビ】



乾燥不足・注油不足による
【ジョイント部のヒビ・サビ】

